



Blutentnahme und Serumgewinnung für die Antikörperbestimmung:

- ✓ **kein** Vollblut einsenden!
- ✓ ein Abnahmeröhrchen ist ausreichend für alle angeforderten Bestimmungen
- ✓ bitte **Serumröhrchen** für die Abnahme verwenden (siehe Grafik Sarstedt dient nur als Beispiel, Röhrchen von anderen Herstellern wie BD, etc. sind unter Berücksichtigung des Farbcodes ebenfalls möglich)

EU-Code



Serum (Gerinnungsaktivator)

Die S-Monovetten enthalten ein Granulat, das mit einem Gerinnungsaktivator (Silikat) beschichtet ist. Durch diesen gerinnungsfördernden Zusatz ist die Gerinnung des Blutes üblicherweise nach 20-30 Minuten abgeschlossen, und die Probe kann zentrifugiert werden. Das Granulat bildet während der Zentrifugation eine Schicht zwischen Blutkuchen und Serum.



Serum-Gel (Gerinnungsaktivator)

Neben dem beschichteten Granulat enthält die S-Monovette® ein Polyacrylester Gel, welches aufgrund der Dichte während der Zentrifugation eine stabile Trennschicht zwischen dem Blutkuchen und dem Serum ausbildet und als Barriere während Transport und Lagerung der Probe wirkt. Bei Einhaltung der empfohlenen Lagerungsbedingungen bleiben die meisten Parameter bis zu 48 Stunden stabil.

US-Code



- ✓ Röhrchen nach Abnahme 30min stehend lagern
- ✓ Zentrifugation: 10min bei 1300-2500g (abhängig von Röhrchen und Zentrifuge)
- ✓ falls keine Abnahmeröhrchen mit Gelschicht zur Verfügung stehen, muss das Serum nach der Zentrifugation in ein neues neutrales Röhrchen umgefüllt werden!
- ✓ bitte das Ausfüllen des Anforderungsscheins nicht vergessen

Versand:

- ✓ die Probe sollte sich nicht übers Wochenende auf dem Postweg befinden
- ✓ zwischen Blutabnahme und Eintreffen der Probe in unserem Labor sollten nicht mehr als 48h liegen - normaler Postversand ist also im Normalfall ausreichend
- ✓ die Probe bitte an folgende Adresse senden:
CellTrend GmbH
Im Biotechnologiepark 3 (TGZ 2)
14943 Luckenwalde

Ergebnis und Rechnung:

- ✓ Ihre Probe wird innerhalb der nächsten 10 Werktage von uns bestimmt
- ✓ die Testergebnisse inkl. Rechnung erhalten Sie bevorzugt per Email (bitte Email-Adresse auf Anforderungsschein bitte leserlich schreiben)
- ✓ Zahlung per Überweisung innerhalb von 14 Tagen