



### CellTrend – PATIENTENINFORMATION

#### 1) Probengewinnung

- 1 Serumröhrchen abnehmen (kein Vollblut einsenden!)
- ca. 10-15min stehend lagern
- zentrifugieren, 10min bei 2400rpm
- Serum abnehmen und in ein neutrales Röhrchen überführen  
ODER: bei Verwendung von Serumröhrchen mit Gelbende ist ein Überführen nicht nötig
- in einem gepolsterten Umschlag am gleichen Tag versenden  
(bei heißen Tagen empfehlen wir einen kalten Kühlakku beizulegen)

→ Name auf dem Röhrchen nicht vergessen!

#### 2) Versand

- **um sicher zu stellen, dass die Proben vor dem Wochenende bei uns eintreffen, bitte möglichst Montag oder Dienstag versenden**
- den Anforderungsschein komplett ausfüllen: Name, Adresse, Email-Adresse (zum Rechnungsversand), zu bestimmende Marker ankreuzen

#### **Adresse:**

CellTrend GmbH  
Im Biotechnologiepark 3 TGZ 2  
14943 Luckenwalde

- Messungen erfolgen in der Regel alle 14 Tage (bzw. 3-wöchig)
- Proben können jederzeit eingesandt werden, wir lagern diese hier bis zur Verwendung

#### 3) Rechnung und Ergebnisse

- Rechnung und Ergebnis wird nach der Messung versendet
- **WICHTIG:** Ergebnisse werden erst an Sie bzw. Ihren behandelnden Arzt versendet, wenn die Rechnung beglichen ist
- Zahlung ist möglich per Überweisung oder PayPal  
→ alle notwendigen Zahlungsinformationen finden Sie auf der Rechnung
- **Wichtig:** bitte die Rechnungsnummer im Verwendungszweck notieren, zur Zuordnung Ihrer Zahlung