



CellTrend – PATIENTENINFORMATION

1) Probengewinnung

→ wir stellen keine Röhren zur Verfügung

→ kein Vollblut einsenden

- 1 Serumröhrchen abnehmen – 1 Röhrchen reicht für alle angebotenen Bestimmungen
- ca. 30min stehend lagern
- zentrifugieren, 10min bei 2400rpm
- Serum abnehmen und in ein neutrales Röhrchen überführen
ODER: bei Verwendung von Serumröhrchen mit Gelbende ist ein Überführen nicht nötig
- in einem gepolsterten Umschlag am gleichen Tag versenden
(bei heißen Tagen empfehlen wir einen kalten Kühlakku beizulegen)

→ Name auf dem Röhrchen nicht vergessen!

2) Versand

→ um sicher zu stellen, dass die Proben vor dem Wochenende bei uns eintreffen, bitte möglichst Montag oder Dienstag versenden

- den Anforderungsschein komplett leserlich (in Druckbuchstaben) ausfüllen: Name, Adresse, Email-Adresse (zum Rechnungsversand), zu bestimmende Marker ankreuzen
- bitte beachten Sie die Feiertage in Brandenburg!

Adresse:

CellTrend GmbH
Im Biotechnologiepark 3
14943 Luckenwalde

3) Rechnung und Ergebnisse

- Rechnung und Ergebnis wird nach der Messung versendet
- **WICHTIG:** Ergebnisse werden erst an Sie bzw. Ihren behandelnden Arzt versendet, wenn die Rechnung beglichen ist
- Zahlung ist möglich per Überweisung oder PayPal
→ alle notwendigen Zahlungsinformationen finden Sie auf der Rechnung
- **Wichtig:** bitte die Rechnungsnummer im Verwendungszweck notieren, zur Zuordnung Ihrer Zahlung