



CellTrend – PATIENTENINFORMATION

Für alle verfügbaren Bestimmungen reicht es, das gewonnene Serum eines einzigen Serumröhrchen einzusenden!

1) Probengewinnung

- Serumröhrchen abnehmen (kein Vollblut einsenden!)
- ca. 30min stehend lagern
- zentrifugieren, 10min bei 2400rpm
- Serum abnehmen und in ein neutrales Röhrchen überführen - bei Verwendung von Serumröhrchen mit Gelbende ist ein Überführen nicht nötig
- in einem gepolsterten Umschlag am gleichen Tag versenden (bei heißen Tagen empfehlen wir einen kalten Kühlakku beizulegen)

→ Name auf dem Röhrchen nicht vergessen!

2) Versand

- unser Labor ist von Montag bis Freitag besetzt, bitte planen Sie den Versand so, dass die Probe(n) nicht über das Wochenende bei der Post liegen bleiben
- den Anforderungsschein komplett ausfüllen: Name, Adresse, Email-Adresse (zum Rechnungsversand), zu bestimmende Marker ankreuzen

Adresse:

CellTrend GmbH
Im Biotechnologiepark 3
14943 Luckenwalde

- Proben können jederzeit eingesandt werden, wir lagern diese hier bis zur Verwendung

3) Rechnung und Ergebnisse

- Rechnung und Ergebnis werden **nach** der Messung versendet
- **WICHTIG:** Ergebnisse werden erst an Sie bzw. Ihren behandelnden Arzt versendet, wenn die Rechnung beglichen ist
- Zahlung ist möglich per Überweisung oder PayPal
→ alle notwendigen Zahlungsinformationen finden Sie auf der Rechnung
- **Wichtig:** bitte die Rechnungsnummer im Verwendungszweck notieren, zur Zuordnung Ihrer Zahlung